


超低温の冷却

Ultra Low Temperature Cooling

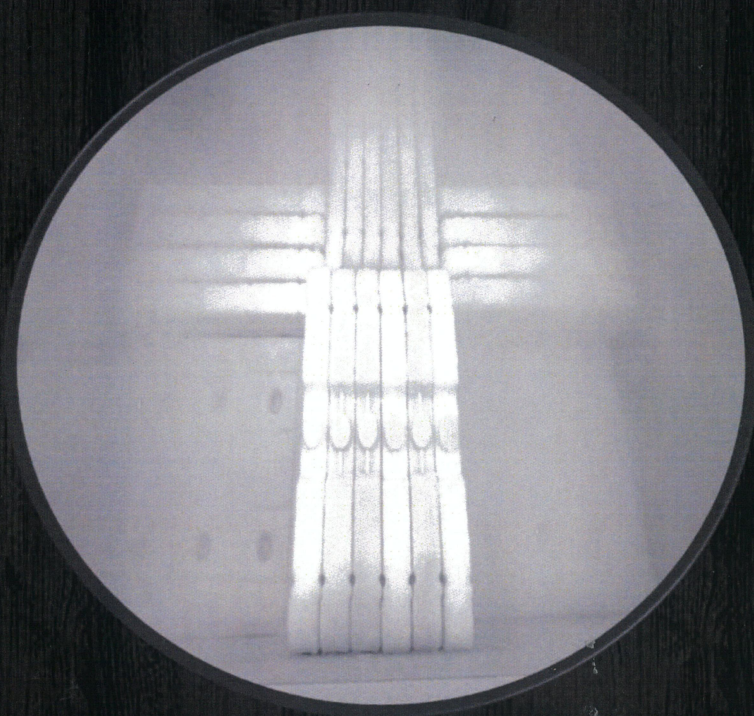

CRYOSOLE

What's CRYOSOLE ?

クライオソールは、 -120°C に冷却された保冷剤に足を乗せるだけの、
手軽なアイシングです。

体の熱放散には表面積比が大きいほど有効であり、体幹部の容積比を1とした場合、腕は5倍、手は10倍、手指は22倍、足裏では69倍も大きくなります。

そのため、表面積比が著しく大きい足裏をアイシングする事で熱放散にはきわめて有効となります。

超低温で足裏を急速にアイシングすることで、血行が促進され
筋肉疲労の低減や新陳代謝の向上、アスリートの試合前、
ハーフタイムに御使用頂くことで、試合中のパフォーマンス向上、
足のツリ防止も期待できます。

筋肉疲労や
炎症の低減効果で
アスリートの
リカバリー、
パフォーマンス向上

血行不良が原因
とされる肩こりや
冷え性、慢性疲労
の改善

新陳代謝の
活性化による
アンチエイジングや
ダイエット効果

皮膚細胞の
代謝向上による
お肌トラブルの改善

※効果効能には個人差があります、上記効果効能を確約するものではありません。




@ADD_freezer



@add_freezer

必要設備

■ -120℃ ウルトラディープフリーザー

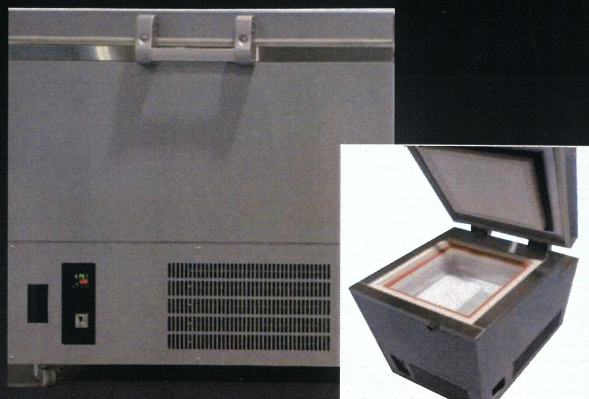

型式	YFZ-1423
冷却性能	-120~-80℃
内容積 (L)	134
内寸法 (mm)	W620×D460×H470
外寸法 (mm)	W920×D935×H1036
重量 (kg)	205
消費電力 (W)	最大3,500
冷媒	特殊混合冷媒(HFC)
電源 (※1)	三相AC200V(50/60Hz)

■ -120℃ 凍結専用保冷剤 アドコールド-45



アドコールド-45	
Lタイプ×30個	
サイズ (mm)	200×280×25
内容量 (g)	1,120

■ 保冷BOX



保冷BOX	
サイズ (mm)	W340×D415×H550
重量 (kg)	6.8
保冷剤収納可能数(枚)	16
保冷剤収納時重量(kg)	30

セット販売価格(※2)

¥ 2,000,000-

リース試算月額(※3)


約 ¥ 38,000-/月

※1 電源は3相AC200V20Aが必要です。電気工事が必要となる場合もございますので、別途ご相談ください。


※2 ウルトラディープフリーザー、アドコールド-45のLタイプを30個、保冷BOXセットでの販売となります。
追加でご購入の場合Lタイプ：¥ 1,800(10個ロット)での個別販売となります。

使用方法

①ウルトラディープフリーザーの電源を接続、
運転後約2時間で-110℃に到達します。

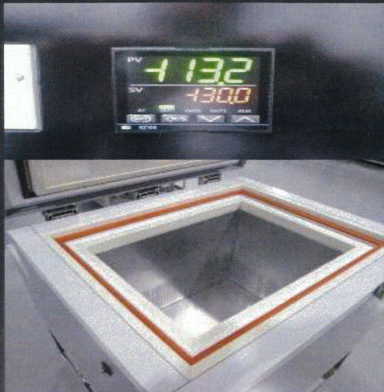


②アトコールド-45(保冷剤)を必要量凍結させてください。
凍結時間は個数によりますが、24時間でタイプ30個が完全凍結します。

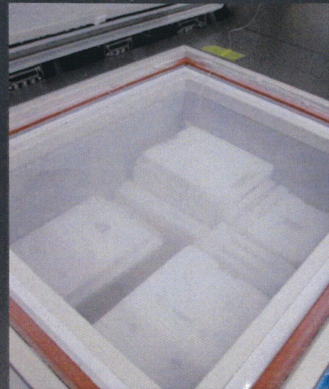

③アトコールド45(保冷剤)をウルトラディープフリーザーより取り出し、タオル等の上に置いて下さい。



④上からタオルを置き、その上に両足をのせて下さい。
※2分～3分を2～3セット行くと、より効果が感じられます。

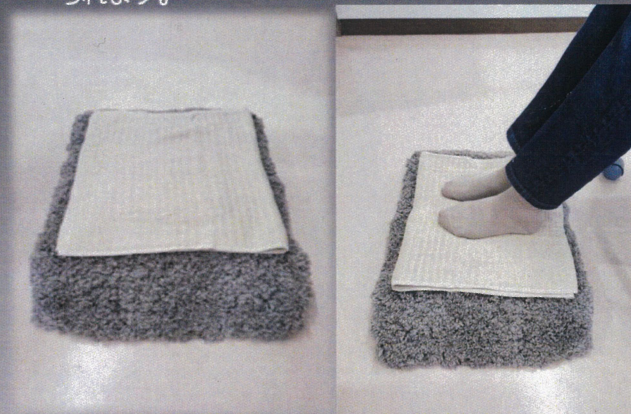

⚠ 注意事項

❄ 凍傷に注意

1.冷却庫内から物を取り出す際は、凍傷防止の手袋を使用して下さい。
運転中の冷却庫内の金属面は超低温状態で、触れると皮膚が貼りつく恐れがあります。

🚫 中に入らない

2.冷却庫の中には入らないで下さい。
冷却庫の扉は密閉度を高めるために重量があり、冷却庫内から押し上げて開くのは困難です。
庫内に閉じ込められた場合、窒息や凍死の危険性がありますので、絶対に冷却庫内には入らないで下さい。

🚫 子供に注意

3.本装置の周辺は整理整頓して下さい。特に冷却庫の手前には踏み台となるような物を置かないで下さい。
幼児や子供などが冷却庫内に入ってしまった場合、窒息や凍死など、重大な事故になる恐れがあります。

株式会社エイディーディー

〒410-0301
静岡県沼津市宮本25番地の1

TEL 055-943-6371
FAX 055-943-6372
Mail info@add-corp.jp

販売代理店



プラスワンを実現

株式会社SEテクノ

〒237-0071
神奈川県横須賀市田浦港町無番地
TEL:046-874-6561 FAX:046-874-6562